



TRADUZIONE IN ITALIANO  
CONFORME ALLA VERSIONE ORIGINALE

# Indice

1. Componenti
2. Avvertenze
3. Dati tecnici
4. Montaggio
5. Utilizzo
6. Garanzia e manutenzione

# 1. Componenti

- A. Cappottina
- B. Cintura di sicurezza a 5 punti e imbottitura
- C. Cestello
- D. Poggiapiedi
- E. Imbottitura seduta morbida con ovatta
- F. Fermo di bloccaggio
- G. Freno



## 2. AVVERTENZE

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI! IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI O ADDIRITTURA LA MORTE!

- MAI lasciare il bambino incustodito. Tenere SEMPRE il bambino sotto controllo mentre è seduto nel passeggino.
- Utilizzare SEMPRE la cintura di sicurezza per evitare eventuali lesioni gravi a causa di cadute o scivolamenti.
- Quando si eseguono regolazioni del passeggino, assicurarsi SEMPRE che non ci siano parti del corpo del bambino impigliate nelle parti mobili del passeggino.
- NON UTILIZZARE il passeggino in caso di parti mancanti o rotte.
- NON PERMETTERE al bambino di salire o arrampicarsi sul passeggino.
- NON PERMETTERE al bambino di rimanere in piedi sul poggiatesta. Il passeggino potrebbe rovesciarsi, causando lesioni al bambino.
- MAI lasciare il passeggino in pendenza, anche con i freni inseriti, il passeggino potrebbe rovesciarsi, causando lesioni al bambino.
- Per evitare l'avanzamento accidentale, azionare SEMPRE i freni, quando il passeggino non viene spinto.

### 3. Dati tecnici

Specifiche	Dimensioni
Profondità (P)	55 cm
Altezza (A)	112 cm
Lunghezza (L)	96 cm
Altezza poggiatesta (AP)	21,27,40 cm
Dimensioni poggiatesta	44 x 19 cm
Larghezza seduta (LS)	40 cm
Profondità seduta (PS)	27 cm
Altezza schienale	56 cm
Larghezza schienale (LS)	40 cm
Peso prodotto	6,9 kg
Capacità di carico	50 kg
Cintura di sicurezza a 5 punti (contenimento)	
Regolazione altezza seduta-poggiatesta	



## 3.1 Accessori



Capottina



Supporto laterale



Fermacaviglie



Imbottitura pettorale



Coprigambe



Imbottitura seduta  
extra



Cestello



Imbottitura cintura



Parapioggia

## 4. Montaggio

### 4.1 Apertura del passeggino



## 4.2 Montaggio cappottina



## 4.3 Chiusura passeggino






#### 4.4 Montaggio fermacaviglie



#### 4.5 Montaggio imbottitura pettorale

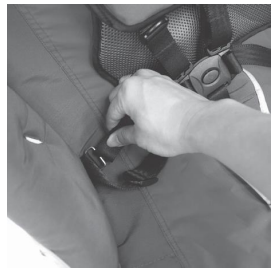


## 5. Utilizzo

### 5.1 Montaggio coprigambe



### 5.2 Applicazione cintura di sicurezza a 5 punti e imbottitura pettorale

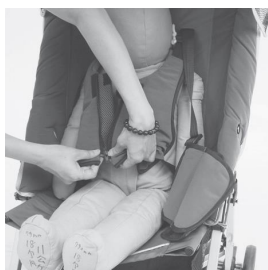

### 5.3 Freni



Attivare con i piedi entrambi i freni per bloccare il passeggino.

### 5.4 Regolazione altezza poggiatesta



## 6. Garanzia e manutenzione

Viene assicurata la garanzia completa di **12 mesi dalla data di consegna del passeggino**. La garanzia copre le riparazioni o sostituzioni che si rendono necessarie in questo periodo.

Per maggiori dettagli consultare le condizioni di garanzia:

1. Gli interventi e l'installazione delle parti di ricambio devono essere eseguiti dal distributore autorizzato/personale del servizio assistenza.
2. In caso di necessità, per richiedere l'applicazione della garanzia, contattare il punto vendita in cui è stato acquistato il passeggino.
3. Se eventuali parti del passeggino richiedono una riparazione o la sostituzione completa o parziale, in seguito ad un difetto di produzione o del materiale, entro il periodo di validità della garanzia, le parti in questione saranno fornite gratuitamente. Nota: la garanzia non è trasferibile.
4. Ogni parte riparata o sostituita sarà coperta fino alla fine del periodo di garanzia previsto per il passeggino.
5. Le parti sostituite dopo la scadenza dalla garanzia originale saranno coperte da una garanzia di tre mesi.
6. Le parti di consumo non saranno generalmente coperte durante il normale periodo di garanzia, a meno che tali parti non richiedano riparazione o sostituzione come chiara conseguenza di un difetto di produzione o materiale. Tali parti includono (ma non solo): rivestimento e ruote.
7. Le condizioni di garanzia sopra indicate si applicano a passeggini nuovi.

8. In circostanze normali, non sarà accettata alcuna responsabilità nel caso in cui sia stata richiesta assistenza per il passeggino in conseguenza a:
- a. mancati interventi di manutenzione sulle parti in linea con le raccomandazioni del produttore
  - b. mancato utilizzo delle parti specificate dal produttore
  - c. danneggiamento del passeggino o di parti di esso a causa di negligenza, incidente o uso scorretto
  - d. manomissione del passeggino o di parti di esso rispetto alle specifiche del produttore o tentativo di riparazione prima di informare il distributore

*Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, capacità di carico, dimensioni e altri dati tecnici. Tutti i dati, misure e capacità sono indicative e non sono da considerarsi come specifiche.*